



CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 CORRETTO UTILIZZO DI GUANTI MONOUSO

OPERAZIONI PRELIMINARI

| | | |
|--------------------|---|--|
| 1 |   | Prima di indossare i guanti è necessario lavarsi le mani con acqua e sapone o con un detergente a base di alcool. |
| 2 |  | Verificare la taglia e l'integrità dei guanti. Verificare di avere unghia corte. Togliere bracciali e/o anelli che potrebbero lacerare il guanto. |
| USO | | |
| 3 |  | Indossare i guanti. |
| 4 |  | Non toccare viso e/o mascherina con il guanto. Se necessario toccare la mascherina, pulire prima il guanto con acqua e sapone o con un detergente a base di alcool. |
| RIMOZIONE | | |
| 5 |  | Con una mano pizzicare il guanto all'altezza del polso evitando di toccare la pelle. |
| 6 |   | Sfilare un guanto e tenerlo nel palmo della mano ancora protetta dal guanto. |
| 7 |  | Con la mano libera inserisci uno o due dita sotto il polsino dell'altro guanto per rivoltarlo. <i>Evita di toccare la parte esterna del guanto.</i> |
| 9 |   | Racchiudere all'interno di quest'ultimo guanto quello già tolto in precedenza. |
| SMALTIMENTO | | |
| 10 |  | Smaltire i guanti nell'apposito contenitore chiuso e, infine, pulire le mani con acqua e sapone o con un detergente a base di alcool. |